


# „Lolly One“

## New Generation Covid19 Antigen Selbsttest

### Spring SARS-CoV-2 Antigen Saliva B


Die angenehme Testung für die Selbstanwendung. Hervorragende Werte bei den Testresultaten. Minimal Invasiv. Er erkennt alle derzeit bekannten Varianten. Einfache und sichere Handhabung. Testresultat mit nur einer Aktion. Keine Flüssigkeiten umfüllen oder tupfen. Geeignet für alle Altersklassen, auch für Kinder. Gebrauchsanweisung beachten.

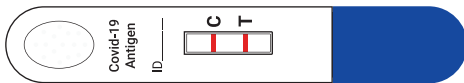

„Alles in einem“ Selbsttest




Swiss Made Technology

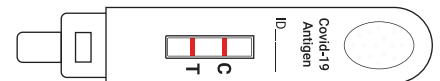

### So funktioniert der Lolly One:

Dreimal kräftig husten, Kappe entfernen, nimm die Spitze des Lolly One in den Mund, streiche mit dem Pad 10 mal in kreisenden Bewegungen sanft über deine Wangeninnenseite und die Zunge. Behalte den Lolly One ca. zwei Minuten mit viel Speichel im Mund. Decke das rechteckige Loch mit Deinen Lippen ab und puste mehrmals kräftig in die Testkassette bis die Flüssigkeit aufsteigt. Stecke die Kappe auf das Testgerät und lege es auf eine saubere Unterlage. Warte bis Du das Testergebnis auf der C und T Linie ablesen kannst.

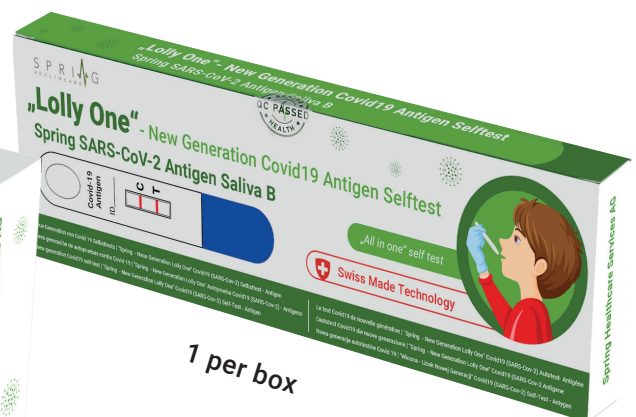

+41 (0)41 552 50 60



info@springhealthcare.org



Turnmstrasse 30  
6312 Steinhausen  
Switzerland